




FFP2 NR

FILTEREND HALFMASKER

nl Gebruiksaanwijzing

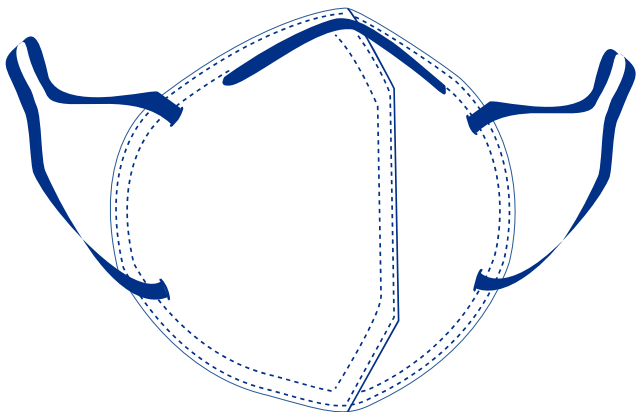

Model:
ZD-001

Productnaam: Filterend halfmasker

Model: ZD-001

Het filterende halfmasker is voornamelijk samengesteld uit “spunbonden non-woven” stof en “melt-blown non-woven” stof, neusklem, oorlus en verstelbare gesp. Bij het inademen zorgt de lage luchtdruk in het masker ervoor dat er lucht in het masker stroomt. De luchtdruk in het masker is hoger dan de omgevingsluchtdruk bij het uitademen.

Beoogd gebruik:

Beschermend masker is bedoeld om te beschermen tegen deeltjes van zowel vaste als vloeibare aerosolen.

Waarschuwing:

1. Selecteer het type masker en bepaal de geschiktheid van het masker voor het beoogde gebruik.
2. Het masker mag niet meer gebruikt worden als het kapot gaat, moeilijk wordt om te ademen of vervuild is door lichaamsvloeistoffen.
3. Dit masker is een wegwerpartikel, het masker mag niet hergebruikt worden en het mag niet gebruikt worden voor meer dan één dienst.
4. Controleer het masker voor gebruik. Zorg ervoor dat er geen kapotte oorlussen, geen gaten of andere beschadigingen aan het masker zitten. Als er schade is geconstateerd, gebruik het masker niet en vervang deze onmiddellijk door een nieuw.
5. De effectiviteit wordt verminderd als gezichtshaar of baard onder de gelaatsafdichting komt.
6. Het masker mag alleen worden gebruikt in de daarvoor bestemde omgeving. Het niet opvolgen van de instructie kan schade aan de gezondheid aanrichten of de effectiviteit van het masker verminderen.
7. Het masker kan de bedoelde bescherming niet bieden als het masker niet correct is opgezet of beschadigd is.
8. Het masker mag op geen enkele wijze aangepast of gewijzigd worden.
9. Dit masker levert geen zuurstof. Alleen gebruiken in voldoende geventileerde ruimtes met voldoende zuurstof.
10. Het masker heeft een houdbaarheid van 3 jaar. Na de vervaldatum mag het masker niet meer worden gebruikt.
11. Niet gebruiken in ruimtes met een explosieve atmosfeer.

Opslagomstandigheden en-methoden:

1. De ongebruikte maskers moeten worden bewaard in een omgeving die goed geventileerd, droog en uit de buurt van licht is. Blijf weg van vuur, verontreinigende stoffen en mogelijke bronnen van vervuiling.
2. Opslagtemperatuur: -20 °C tot 50 °C en minder dan 80% relatieve luchtvochtigheid.
3. Bewaar de maskers tijdens het transport in de originele verpakkingen/ dozen ter bescherming tegen mechanische beschadiging en vervuiling.

Gebruiksbeperkingen: Geen

Het masker voldoet aan Verordening (EU) 2016/425, en EN 149: 2001+ A1: 2009.

Opzet instructie



Haal het masker uit de verpakking en trek aan de verstelbare gesp met draad of een ander klein gadget



Plaats het masker over het gezicht met de neusklem naar boven gericht, zoals afgebeeld. Plaats beide oorlussen achter uw oren en zorg ervoor dat uw kin bedekt is.



Vorm de neusklem zodanig dat deze aansluit op de vorm van uw neus om ervoor te zorgen dat het masker comfortabel op uw gezicht past.



Stel het masker met verstelbare gesp in op een juiste positie en zorg ervoor dat er geen lekkage is.



Om de pasvorm te testen: plaats beide handen over het masker en adem krachtig in, er moet een negatieve druk worden gevoeld. Als er aan de rand lucht lekt, plaatst u het masker opnieuw.

Notified Body: UNIVERSAL CERTIFICATION and SURVEILLANCE SERVICES Trade Co. NB:2163
Address: Necip Fazil Bulvarı Keyap Sitesi E2 Blok No: 44/84 Yukarı Dudullu Ümraniye/İSTANBUL - TÜRKİYE



Bepaling
luchtdichtheid



Temperatuurlimiet



Houdt
droog



Niet blootstellen
aan direct
zonlicht



Eenmalig
gebruik



Zie informatie
verstrekt door
de fabrikant

CE 2163

Fabrikant:

Zhende Medical Co., Ltd.

Tel.: +86-0575-88771820

Gaobu Town, 312035, Shaoxing City, Zhejiang Province, China

EU Declaration of Conformity Internet download address: www.zhende.com

Productiedatum: Maand/Jaar

Houdbaarheidstermijn: 3 jaar

Version: 03

Rev. Date: 2020. 11. 10.