



20 ml oorspray  
**Jeuk**  
 Oorspray  
**A.Vogel**



**Natuurlijke oliën**  
 A.Vogel Oorspray bevat een combinatie van natuurlijke kokosolie en zonnebloemolie met goudsbloemextract.

**Handige spray**  
 A.Vogel Oorspray is eenvoudig in het gebruik: door de makkelijke doseerspray komt de olie direct op de juiste plaats.

**Dosering en gebruik**  
 Volwassenen: 1-2x per dag, één spray per oor.  
 Kinderen vanaf 12 jaar: 1x per dag, één spray per oor.  
 Raadpleeg bij kinderen eerst een arts.




Indien nodig kan de oorspray gerust langer worden gebruikt. Zonder onderbreking tot maximaal 30 dagen te gebruiken.

**Gebruik bij gehoorapparaten**  
 's Avonds voor het slapengaan, na het uitdoen van het gehoorapparaat, één keer in het oor sprayen. Gebruik van de oorspray heeft geen nadelige invloed op het gehoorapparaat.



**Oorspray**  
**Jeuk**

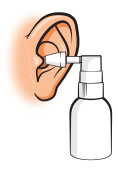

Bij jeuk  
 in de gehoorgang



20 ml oorspray op oliebasis



**Ingrediënten**  
 Middellange triglycerides afkomstig van kokosnoot, Helianthus annuus (zonnebloemolie), Calendula officinalis (goudsbloem) extract. A.Vogel Oorspray bevat geen conserveringsmiddelen.

**Bewaren**  
 Buiten bereik en zicht van kinderen houden. Na opening is het product 6 maanden houdbaar.

Niet gebruiken na de vervaldatum: zie bovenzijde verpakking.



Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

**Inhoud 20 ml**



**Fabrikant/Distributeur:**  
 A.Vogel B.V.  
 J.P. Broekhovenstraat 16,  
 NL-8081 HC Elburg



**Gebruiken bij**  
 Jeuk in de gehoorgang, helpt ter voorkoming van zwemmersoor en overmatig oorsmeer.

**Jeukende oorhuid**  
 De spray verzacht de droge huid in het oor en verlicht daardoor de jeuk.

**Overmatig oorsmeer**  
 De spray bevat een natuurlijke olie die helpt ingedroogd oorsmeer zacht te maken, waardoor het makkelijker te verwijderen is.

**Zwemmersoor**  
 De spray bevat een natuurlijke olie die een laagje vormt op de oorhuid. Hierdoor heeft water minder invloed, wat de kans op het krijgen van een zwemmersoor verkleint.

**Niet tevreden geld terug**  
 Kijk voor voorwaarden op [www.avogel.nl](http://www.avogel.nl)

**Persoonlijk advies?**  
 T: 0900 - 246 46 46  
 W: [www.avogel.nl](http://www.avogel.nl)  
 E: [info@avogel.nl](mailto:info@avogel.nl)

Verhouding:

75% (15,75pt)

100% (21pt)

55% (11,55 pt)

Medisch hulpmiddel



8 711596 591392

7272750  
 20B4



B/2616/92133



**MIXCOM DESIGN**

Branderweg 5a,  
 8042 PD Zwolle  
 Tel. 0 (031) 38 303 10 50

**CORRECTIERONDE**

1e proef: 12-03-'20  
 2e proef:  
 3e proef:  
 4e proef:  
 5e proef:  
 6e proef:  
 7e proef:  
 Anders:

**KLEURGEbruik**

- Cyaan
- Magenta
- Geel
- Zwart

**STEUNKLEUREN**

- PMS 286 C
- PMS 347 C
- Stans

**GOEDKEURING**

**ARTWORK**  
 Datum:  
 Door:

**ARTWORK NAAR**

**Drukker**  
 Datum:  
 Door:

**TEKSTGROOTTE**

Platte tekst: 6,8 pt  
 Regelaafstand: 8,5 pt