

10 ml

Indicatie

Oordruppels om overmatig oorsmeer zacht te maken en te verwijderen.
Geschikt voor kinderen en volwassenen.

Gebruiksaanwijzing

Richt de tuit zijdelings op het oor en druppel 10 tot 15 druppels in het gehoorkanaal.
Druk kort en voorzichtig op het flesje om de druppels in te brengen.
Sluit vervolgens het oor af met een watje, zodat Otalgan[®] Oorsmeer kan inwerken op het oorsmeer.
Spoel na 5 tot 10 minuten de gehoorgang uit met water op lichaamstemperatuur.


Samenstelling

Glycerol, ethanol, natrium docusaat, gedestilleerd water.


Duur van de toepassing

In geval van taai oorsmeer de behandeling meerdere keren herhalen.
In geval van overmatig oorsmeer dient het product te worden gebruikt onder medisch toezicht.

- 1 De flacon in verticale positie houden en de dop voorzichtig opendraaien (= bovenste dop)

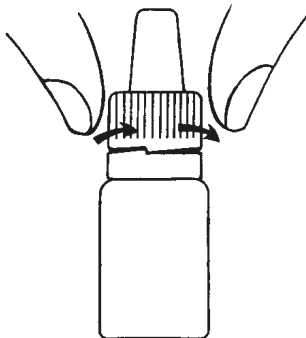

- 2 De oordruppels direct binnen in het oor druppelen

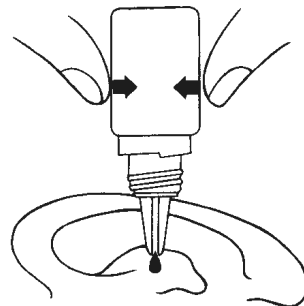

OTALGAN[®] OORSMEER



10 ml

Waarschuwingen

Niet te gebruiken in geval van:

- perforatie van het trommelvlies
- overgevoeligheid voor één van de bestanddelen
- wondjes of ontstekingen aan de gehoorgang

Otalgan Oorsmeer mag niet gelijktijdig gebruikt worden met geneesmiddelen ter behandeling van de gehoorgang.

Bij pijn de gehoorgang reinigen met water op lichaamstemperatuur en het gebruik van Otalgan Oorsmeer stopzetten.

Vermijdt elk contact met de ogen. In geval van contact met de ogen direct en overvloedig schoonspoelen met stromend water.

Wijze van bewaren

Buiten bereik van kinderen houden. Bewaren op kamertemperatuur (niet boven 30°). Houdt het flesje goed gesloten en buiten de invloed van licht en warmte.

Maximaal 6 maanden houdbaar na openen van het flesje.

Niet te gebruiken na de houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat vermeld.

VEMEDIA

Distributeur: Vemedica B.V., Diemen

Vemedica Informatielijn: 0900 2333666 (€ 0,15 /min.) of www.vedemia.nl

 **Vifor**
France

Gemachtigde: Vifor France SA, F-92300 Levallois-Perret

Fabrikant: Vifor SA, CH-1752 Villars-sur-Glâne