

**NESTOSYL® WONDGEL BEHANDELING****Indicatie**

Nestosyl Wondgel is een parabeenvrije, hydrocolloïde gel die geschikt is voor de verzorging van lokale, droge of vochtige wonden. De wondgel is een medisch hulpmiddel dat de wondheling indirect bevordert door de micro-omgeving van de wond te regelen.

Toe te passen bij acute wonden zoals:

- ✓ Oppervlakkige brandwonden
- ✓ Zonnebrand
- ✓ Snij- en schaafwonden
- ✓ Doorligwonden\*
- ✓ Zweren

\*Nestosyl kan bij lichte vorm van doorligwonden gebruikt worden indien vastgesteld door een arts.

Nestosyl Wondgel mag ook gebruikt worden op zweren en wonden als gevolg van diabetische voetklachten. Diabetici met voetproblemen dienen, voor gebruik van de Nestosyl Wondgel, eerst hun huisarts te raadplegen.

**Eigenschappen en samenstelling**

Nestosyl Wondgel bestaat uit een zuur carbomeer dat gestabiliseerd wordt door carnosine, een basisch peptide dat van nature aanwezig is in de huid. In droge wonden, zoals brandwonden, schaafwonden en heelkundige wonden, zorgt de bedekking met dit carbomeer voor een occluderend effect: het houdt de verdamping van vocht tegen en vermindert het vochtverlies door de opperhuid. Carnosine buffert de zure polymeren en is tevens een antioxidant. Op natte, vochtafgevendende wonden absorbeert het carbomeer het overtollige wondvocht. De wondgel verkoelt, verzacht het contact met pleisters en/of verband en verkleeft niet.

**Samenstelling**

Zuur colloïdaal carbomeer, carnosine, water, natriumbenzoaat, kaliumsorbaat.

**Gebruiksaanwijzing**

Brandwonden en zonnebrand:

- koel direct met veel water
- voorzichtig een dikke laag (0,5 cm) wondgel aanbrengen
- bij lichte/oppervlakkige brandwonden meerdere malen per dag (naar behoefte) de wondgel aanbrengen
- de huid niet afdekken
- bij diepere brandwonden direct de hulp van een arts inschakelen

Gesloten wonden:

- reinig en ontsmet de plaats van behandeling
- breng Nestosyl Wondgel aan op de wond zonder deze met de pompflacon aan te raken
- breng een verband of pleister aan indien nodig

Open wonden:

- reinig en ontsmet de wond
- voorzichtig droogdeppen
- breng een dikke laag (0,5 - 0,75 cm) aan op de wond
- breng verband of pleister aan
- vervang dagelijks het verband of de pleisters en breng een nieuwe laag aan

Nestosyl Wondgel is niet de eerste maatregel bij brandwonden! Koel de wond onmiddellijk gedurende een twintigtal minuten af onder lauwwarm, stromend water.

Deze handeling moet zo vlug mogelijk plaatsvinden omdat het gunstige effect na 30 minuten afneemt en verdwijnt. Om het gevaar van onderkoeling te voorkomen is het advies niet te koud water, vooral wanneer de verbranding een grote oppervlakte bestrijkt. Pas later wanneer de ernst van de brandwond goed is ingeschat, de wondgel toepassen.

Nestosyl Wondgel kan gebruikt worden bij oppervlakkige brandwonden: brandwonden die de epidermis en/of dermis aantasten, gewoonlijk gekenmerkt door zwelling, rode huid en blaren.

**Bijzondere voorzorgen**

Gebruik dit product niet als u overgevoelig of allergisch bent voor één of meerdere van de ingrediënten. In zeldzame gevallen is irritatie gemeld. Bij irritatie of een allergische reactie onmiddellijk het gebruik staken. Gebruik de Nestosyl Wondgel niet op gezicht, ogen, oogleden of slijmvliezen.

Raadpleeg steeds een arts:

- voor grotere, uitgebreide of zeer diepe wonden
- voor kleine, sterk geïnfecteerde wonden
- in geval van trage genezing of risico op complicatie

In deze gevallen is Nestosyl Wondgel ook nuttig maar voortaan het geenszins als enige behandeling.

**Bewaarcondities**

Het product moet bewaard worden tussen 5°C en 25°C. Buiten bereik van kinderen houden.

Het product niet meer gebruiken wanneer de vervaldatum verstreken is (zie verpakking).

Uitwendig gebruik.

**Verpakking**

Gebruik dit product niet als u overgevoelig of allergisch bent voor één of meerdere van de ingrediënten. In zeldzame gevallen is irritatie gemeld. Bij irritatie of een allergische reactie onmiddellijk het gebruik staken. Gebruik de Nestosyl Wondgel niet op gezicht, ogen, oogleden of slijmvliezen.

■ Fabrikant:  
Oystershell NV  
Nijverheidsweg 10  
9820 Merelbeke  
Belgium

Distributeur:  
Remark Pharma  
Industrieweg 24  
7949 AK Rogat

Inhoud 75 g e

CE 1639

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien in maart 2019.

3879/1910  
1574/620377  
19C/07020410/0

voor meer informatie [www.nestosyl.nl](http://www.nestosyl.nl)